

PROTHESE ORTHOPEDIQUE D'HYPEREXTENSION "JEWETT"

La procédure d'application avec assistance



1. Le patient doit être couché sur le dos.
2. La partie antérieure de la prothèse est placée en premier. Pour marquer l'emplacement initial du dispositif, l'assistant met son doigt annulaire sur la point du sternum (l'appendice xiphoïde) suivant avec le doigt majeur et l'index de façon à marquer la position du haut de la prothèse. Les letters "TF" (top front) représentent le haut et le devant du "Jewett"..
3. Tournez le patient sur son coté droit et placer la courroie en dessous du patient.
4. Retournez le patient sur son dos.
5. L'assistant tire la courroie bien tendue l'autre coté du patient.
6. L'assistant pousse avec sa main le devant du dispositif du coté droit jusqu'à l'agrafe. En même temps, tirez la courroie de façon que l'engrenage (worm gear) est place a la position antérieure de l'agrafe.
7. Tournez le levier sur l'engrenage le nombres de fois indiqué par votre technicien.
8. Pour enlever la prothèse, tournez le levier pour retourner l'engrenage au début et renverser les étapes précédents.