



PROTHESE ORTHOPEDIQUE POUR LA COLONNE VERTEBRALE TLSO (CLAM SHELL)

Lire attentivement les instructions pour l'application. Communiquez avec Cascade Orthotics Ltd. pour prendre un rendez-vous avec notre bureau 2 semaines après l'emplacement initial de la prothèse ou 2 semaines après votre sortie d'hôpital. La prothèse "TLSO" nécessite l'aide d'une autre personne pour son application.

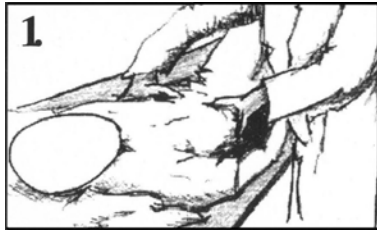


1. Avec le patient couché sur son dos, identifiez les contours de la taille du patient. Les contours du dispositif "TLSO" doit être positionnés de façon à être entre le haut des haanches et le bas de la cage thoracique du patient.

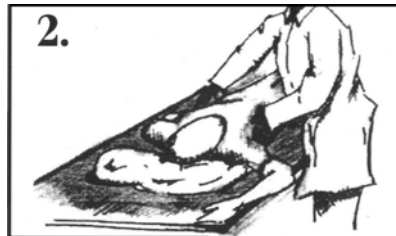

2. Le patient doit lever le bras qui est du même coté que l'assistant, vers sa tête.



3. Tournez le patient envers l'assistant sur son coté.

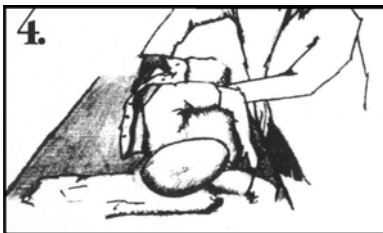

4. En premier, on doit mettre la partie postérieure du dispositif sur le dos du patient en prennant soin que les contours du depositif s'alignent parfaitement avec la taille du patient.



5. Retournez le patient sur son dos. Mettre la partie antérieure du dispositif sur le devant du patient. Prenez soin que les contours de la prothèse s'alignent avec la taille et les haanches du patient.



6. Attachez les courroies du milieu bien tendues en premier, après celles du bas en finissant avec celles du haut. Ajustez la prothèse "TLSO" au besoin.

CASCADE
ORTHOTICS LTD.

2636 Parkdale Blvd. NW Calgary, AB T2N 3S6 (403) 283-7872